



Hinweise für den Gebrauch

Arztstuhl

HP



Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von BTC Srl entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Nutzung des Arztstuhls bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf. So können Sie die Funktionen des Stuhls bestmöglich nutzen und seine zuverlässige Leistung und Sicherheit langfristig erhalten.

INHALT	
VERPACKUNG UND LIEFERUNG	3
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	3
ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE	4
HINWEISE	4
EINSTELLUNG DER SITZHÖHE	5
EINSTELLUNG DER NEIGUNG DER RÜCKENLEHNE	5
EINSTELLUNG DER HÖHE DER RÜCKENLEHNE	5
PRODUKTIDENTIFIKATION	5
REINIGUNG UND DESINFEKTION	6
INSTANDHALTUNG	6
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	7

Verpackung, Lieferung und Montage	
<p>Öffnen Sie den Karton an der Oberseite und nehmen Sie den Korpus, die Basis und die Gasdruckfeder heraus.</p> <p>Stellen Sie die Basis auf den Boden und setzen Sie die Gasdruckfeder in die konische Halterung.</p> <p>Stecken Sie den Korpus des Stuhls auf das andere Ende der Gasdruckfeder.</p> <p>Der Arztstuhl ist jetzt einsatzbereit.</p>	

TECHNISCHE MERKMALE

maximale Belastung der Sitzfläche	180 kg
maximale Belastung der Rückenlehne	80 kg
Gesamtgewicht	14,5 kg
Neigungswinkel der Rückenlehne	0° bis 3°
Abmessungen der Verpackung (in cm)	62x62x65

Abmessungen des Arztstuhls (in mm)



ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE	
ACHTUNG, lesen Sie vor der Verwendung die Hinweise für den Gebrauch.	
Konzipiert unter Einhaltung der EU-Richtlinie 93/42/CEE „MEDIZINISCHE GERÄTE“	

HINWEISE
<p>Zweck: Der Stuhl HP ist für den sicheren Gebrauch in der ambulanten podologischen Praxis konzipiert und soll während der Arbeit eine korrekte Körperhaltung unterstützen.</p> <p>Die unter „Technische Eigenschaften“ angegebenen Maximalbelastungen dürfen nicht überschritten werden. Die auf dem Stuhl angebrachten Etiketten dürfen nicht entfernt werden. Sollten die Etiketten unleserlich werden, sind sie zu ersetzen.</p>
<p>BTC übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden aufgrund der Missachtung der Hinweise zum Gebrauch und der in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen.</p>

<p>EINSTELLUNG DER SITZHÖHE</p>	
<p>Zur Einstellung der Sitzhöhe Hebel nach oben ziehen.</p>	
<p>EINSTELLUNG DER HÖHE DER RÜCKENLEHNE</p>	
<p>Zur Einstellung der Höhe der Rückenlehne Knopf drücken.</p>	
<p>PRODUKTIDENTIFIKATION</p>	
<p>Das Modell kann anhand eines Schilds mit eindeutiger Kennnummer identifiziert werden (siehe Abbildung).</p> <p>Wenn Sie technische Hilfe oder Ersatzteile benötigen, muss diese Seriennummer angegeben werden.</p>	

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion der äußeren Oberflächen des Arztstuhls (Kunststoffteile, Lackierungen, Bezug) handelsübliche Desinfektionsmittel. Prüfen Sie zuvor, dass die unten aufgeführte maximale Wirkstoffkonzentration nicht überschritten wird.

ACHTUNG!

Die hier aufgeführten Wirkstoffkonzentrationen dürfen nicht überschritten werden. - Verwenden Sie keine alkohol- oder ammoniakhaltigen Produkte, Schleifmittel oder Benzol. - Wischen Sie die Oberflächen nach der Desinfektion mit einem feuchten Tuch nach (Desinfektionsmittel können trotz Verdünnung die Oberflächen angreifen).

- Glutaraldehyd 2 %: 10 %
- Ethanol 96 %: 40 %
- Formaldehyd: 0,01 %
- Glyoxal: 0,15 %
- Propanol: 35 %

Das Produkt wird mit einem weichen Tuch auf den zu reinigenden Oberflächen verteilt. Sprühen Sie Desinfektionsmittel nicht direkt auf die Bauteile, damit die Funktionstüchtigkeit nicht durch eindringende Chemikalien eingeschränkt wird.

INSTANDHALTUNG

Spezifische Wartungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Zur Wahrung einer reibungslosen Funktion sollten die Räder des Stuhls in regelmäßigem Abstand gereinigt werden.



BTC Srl
Via Altobelli Bonetti, 8/A
40026 Imola (BO), Italien
It. Steuernummer/EU VAT IT02489471207
Handelsregister-Nr. 443644
Gesellschaftskapital 116.000 EUR vollst. eingezahlt

Tel.: +39 (0)542 643664
Fax: +39 (0)542 647391
<http://www.btc-med.it>
E-Mail: btcmed@btc-med.it

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF COMPLIANCE
ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**



BTC Srl dichiara che i dispositivi medici

BTC Srl declare que les dispositifs médicaux

BTC Srl declares that the medical devices

BTC Srl erklärt, dass die ärztlichen Vorrichtungen

BTC Srl declara que los dispositivos médicos

Modello / Modèle / Model / Modell / Modelo	Matricola / No. de fabrication / Serial No. / Seriennr. / Número de serie da/de/from/von/de ÷ a/a/to/bis/a
Arztstuhl HP Gel hoch ohne Fußstütze	9120122-000000 ÷ 9120122-999999
Arztstuhl HP Gel hoch mit Fußstütze	9120123-000000 ÷ 9120123-999999
Arztstuhl HP Gel niedrig ohne Fußstütze	9120113-000000 ÷ 9120113-999999
Arztstuhl HP Gel niedrig mit Fußstütze	9120114-000000 ÷ 9120114-999999

sono conformi ai requisiti applicabili per i dispositivi di classe 1 della direttiva 93/42/CEE.

sont conformes aux qualités requises applicables da la directrice 93/42/CEE.

complies with the applicable requirements of the 93/42/CEE directive.

mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/CEE übereinstimmen.

se conforma con los requisitos aplicables del directorio 93/42/CEE.

Imola, 18/09/2019

BTC Srl